



# クオンティフェロン(QFT) 検査 新しく追加された 採血方法のお知らせ

ヘパリンリチウム採血管1本でも  
血液採取が可能になりました  
(1本採血)

- 1本採血したヘパリンリチウム採血管は、直ちに2~8℃で保存してください。
- 1本採血したヘパリンリチウム採血管を2~8℃で保存・移送したとき、検査開始(QFT専用採血管への分注/培養)時間を採血後32時間までとすることができます。

# QFT検査の採血方法の変更について

## 現行




3本の  
QFT専用採血管に採血

16時間以内  
22±5℃で保存




培養開始

## 新しく追加された採血方法

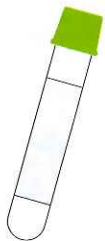

1本の  
ヘパリンリチウム  
採血管に採血

32時間以内  
2~8℃で保存

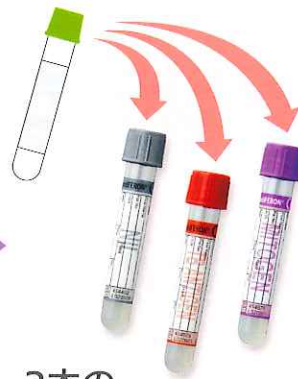

3本の  
QFT専用採血管に  
分注後、速やかに培養開始



1本採血を行っても、血液検体の培養には  
QFT専用採血管を使用します。

### 【検査要項】

検査コード	検査項目	材料	検体量	容器	保存条件	検査日数	保険点数	保険収載名称
2430	QFT (クオンティフェロン)	全血	5mL	ヘパリンリチウム QFT	2 ~ 8℃	営業日 3~7日	630点	結核菌特異的 インターフェロン-γ 産生能

備考: 予約検査になっておりますので、必ず弊社までご連絡下さい。  
採血後、すみやかに冷蔵庫(2-8℃)で保存して下さい。  
検査受付日は月~金曜日(祝前日は受託不可)

### 【選任製造販売業者】

株式会社キアゲン  
〒104-0054 東京都中央区勝どき3-13-1 Forefront Tower II

### 【外国特例承認取得者】

キアゲン サイエンス LLC. (米国)

### 【販売元】

日本ビーシージー製造株式会社  
お問い合わせ先: カスタマーセンター  
〒112-0012 東京都文京区大塚一丁目5番21号  
茗溪ビルディング5F  
TEL:03-5395-5590 FAX:03-5395-5580

**KML** 株式会社 京浜予防医学研究所 〒216-0001 川崎市宮前区野川1432-1  
TEL 044-777-3254  
<http://www.kml-net.co.jp/>